


Suture PASS

*Pasadores de suturas
en técnicas artroscópicas*

Suture passers in arthroscopic techniques

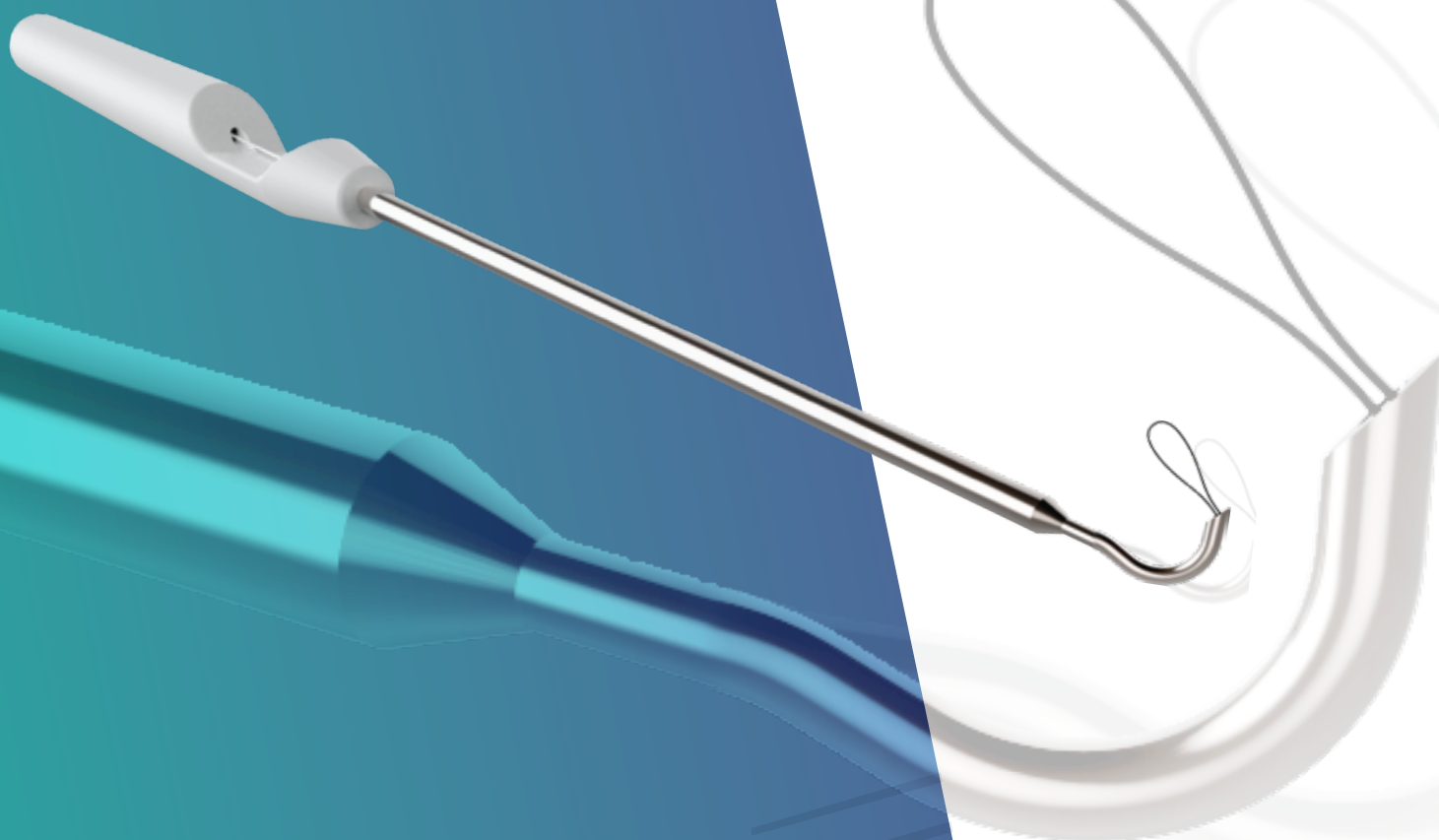

SuturePass™ es un instrumento de un solo uso envasado estéril para el pasaje de suturas sobre tejidos blandos en técnicas artroscópicas. Se presenta en varios ángulos para reparaciones artroscópicas de Bankart, SLAP y manguito rotador. El SuturePass tiene una punta de 2,0 mm de diámetro exterior y viene precargado con un lazo de Nitinol monofilamento utilizado para transportar la sutura a través de los tejidos blandos.

La punta afilada y el eje de pequeño diámetro penetrarán fácilmente en el tejido blando, mientras que el eje reforzado resistirá la flexión. Después de que la punta pasa a través de un tejido blando, el asa se despliega y se recupera a través de una cánula con un Crochet Hook o Suture Retriever. Se coloca un hilo de sutura o cola de sutura de un anclaje de sutura colocado previamente en el bucle, y se tira del extremo opuesto del bucle, liberando la sutura a través del tejido y hacia fuera de la cánula.

Muy simple y fácil de usar. Suture Pass simplificará la manipulación de suturas en sus procedimientos artroscópicos.


SuturePass™ is a single use sterile device for suture passage through soft tissue for arthroscopic techniques. It is available with different angles for Bankart, SLAP and rotator cuff arthroscopic repairs. Suture Pass has a 2.0 mm external diameter endpoint; it is preloaded with a Nitinol monofilament loop used to carry the suture through soft tissue.

The sharp point and the small diameter axis penetrate smoothly into the soft tissue; the reinforced axis withstands bending. Once the tip has penetrated into the soft tissue, the handle unfolds and it is retrieved through the cannula with a Crochet Hook or Suture Retriever. The suture thread or suture tail previously fitted to the loop is placed and pulled from the opposite end of the loop, thus releasing the suture through the tissue and out of the cannula.

Easy to use. Suture Pass will simplify suture manipulation in arthroscopic procedures.

Códigos y Angulaciones

Codes y Angulations

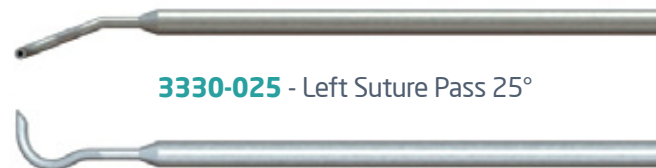

3330-025 - Left Suture Pass 25°



3330-045 - Left Suture Pass 45°



3331-025 - Right Suture Pass 25°



3331-045 - Right Suture Pass 45°



Características

Features

Producto descartable
Disposable

Precargado con un Loop de nitinol
Preloaded with nitinol loop

Estéril ETO
ETO Sterile

Diámetro exterior de punta Ø2.0mm
Endpoint external diameter of Ø2.0mm

